



# DIAGNOdent® pen Paro sonda

## Istruzioni d'uso in breve




KaVo. Dental Excellence.

Con la Paro Sonda (n° mat. 1.004.0370) è possibile individuare concrezioni nelle tasche gengivali fino a 9 mm di profondità.

-  *La sonda può spezzarsi e causare lesioni. Non usare la sonda come leva!*
-  *Prima di ogni trattamento eseguire il ricondizionamento della sonda. Si prega di rispettare le istruzioni di condizionamento della sonda fissurale riportate nelle istruzioni per l'uso di DIAGNOdent per 2190.*

### Impiego:


Introdurre la sonda nella tasca parallelamente alla superficie del dente.

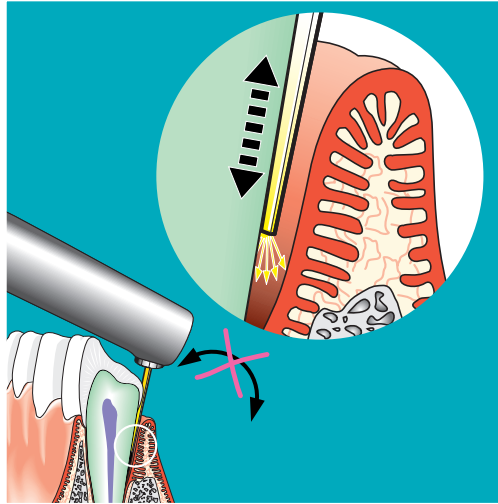

### Visualizzazione DIAGNOdent per 2190 con Paro Sonda:

Valore	Significato
>40	Concrezioni nella tasca gengivale
5-40	Piccolissime concrezioni Concrezioni vicino alla sonda Event. carie radicolare
<5	Tasca pulita.

### Confronto tecnico:

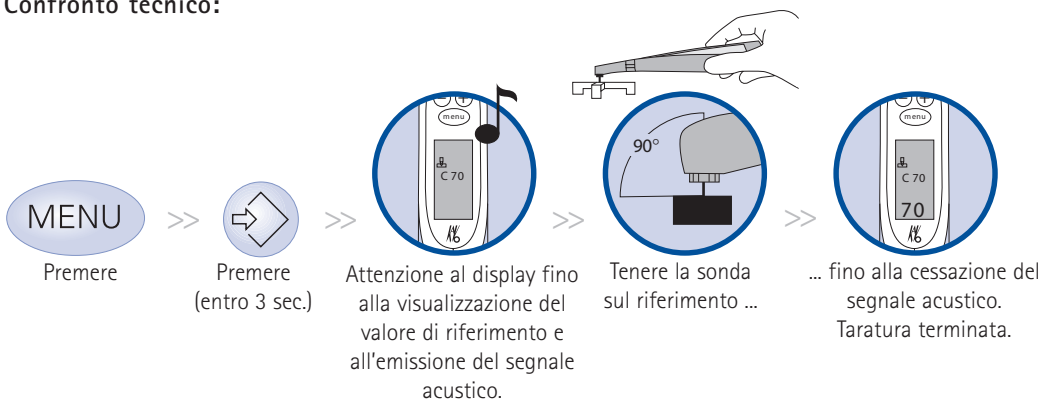

Le presenti istruzioni d'uso in breve contengono esclusivamente le funzioni principali. Alla prima messa in funzione e nel caso di utilizzo da parte di personale che non abbia ancora familiarizzato con questo prodotto medicale, è assolutamente necessario osservare delle istruzioni d'uso DIAGNOdent per 2190.



KaVo. Dental Excellence.