

Meron

RÖNTGENOPAKER GLASIONOMER
BEFESTIGUNGSZEMENT



Meron

DER KLASSIKER FÜR KONVENTIONELLE BEFESTIGUNGEN

Glasionomerzemente werden seit langem in den Indikationsbereichen Füllung und Befestigung eingesetzt. Sie sind schnell und unkompliziert in der Anwendung, das Ergebnis stellt Patienten und Zahnarzt in jeglicher Hinsicht zufrieden. Beispielsweise ist bei der Anwendung vom Meron Befestigungszement das Auftreten postoperativen Sensitivitäten nicht bekannt. Meron ist in der Pulver-Flüssigkeits-Variante seit langer Zeit bewährt. Jährlich werden millionenfach Befestigungen mit Meron durchgeführt. Dieses Material wurde weiter verbessert und ist jetzt in der neuen praktischen Applikationskapsel erhältlich.

Meron in der neuen Applikationskapsel ermöglicht die schnelle und sichere Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays aus Metall und Vollkeramik sowohl auf natürlicher Zahnhartsubstanz als auch auf Implantatabutments. Mit Meron lassen sich zudem auch Metall-Wurzelstifte bzw. Metall-Stift-Stumpfaufbauten, konfektionierte Stahlkronen und orthodontische Bänder befestigen.


Meron, der bewährte Glasionomer Befestigungszement, bietet eine Reihe von Vorteilen, die bei der täglichen Arbeit besonders von Bedeutung sind. Während der Applikation fließt das Material optimal an die Ränder der Restauration an. Bei der Eingliederung ist es jedoch standfest. Dies vereinfacht die Arbeit vor allem im Unterkiefer. Mit einer Filmdicke von nur 16 - 20 µm bleibt die Passgenauigkeit der Restauration erhalten. Auch die Entfernung des Überschusses ist denkbar einfach. Während der Aushärtephase kann dieser leicht mit einer Sonde etc. entfernt werden. Meron ist zudem röntgenopak und weist eine hohe Transluzenz auf. Diese unterstützt das natürliche Erscheinungsbild vollkeramischer Restaurationen.

Transluzenz



Technische Daten

Filmdicke	16 - 20 µm
Röntgenopazität	205 %Al
ausdrückbare Menge	ca. 400 mg
Verarbeitungszeit	3 min.
Aushärtezeit	3 - 7 min.

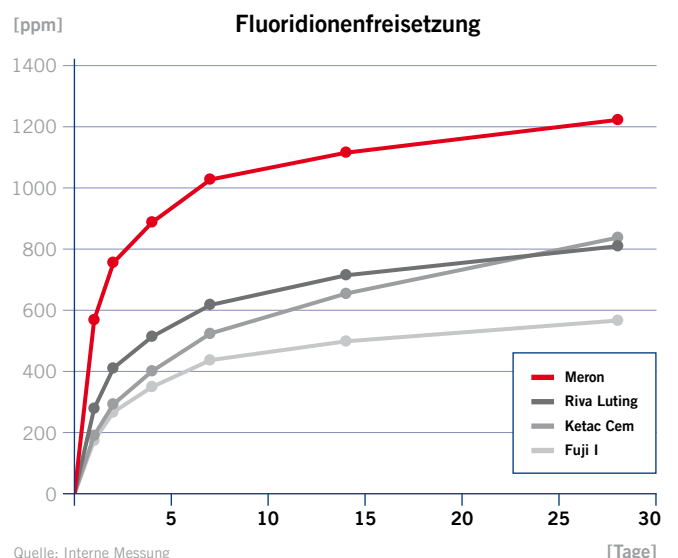

Im Vergleich zu Mitbewerberprodukten setzt Meron in der neuen Applikationskapsel beginnend mit dem ersten Tag die größte Menge an Fluoridionen frei.


VOCO's neue Applikationskapsel

EINFACH PRAKTISCH

VOCO's neue Applikationskapsel ermöglicht sowohl eine einfache Aktivierung, als auch eine praktische Applikation. Zum Aktivieren wird kein Aktivator mehr benötigt. Die Kapsel wird einfach mit der Hand auf einen festen Untergrund (z. B. Tisch) gedrückt. Der farbige Flüssigkeitskolben schiebt sich in die Pulverkammer, Pulver und Flüssigkeit gelangen so zusammen. Das darauffolgende Mischen im Kapselmischer bleibt wie gewohnt. Anschließend wird die Applikationsöffnung nach oben geführt und die Kapsel ist nach dem Einsetzen in einen handelsüblichen Applikator sofort anwendungsbereit.



Im Vergleich zu Kapseln anderer Glasionomer Befestigungszemente hat Meron mit ca. 400 mg genau die richtige Menge an verwendbarem Material. Auch große Restaurationen können so bequem und mit Überschuss befestigt werden. Eine ausreichende Menge pro Kapsel gewährleistet ein stressfreies Arbeiten. Ist wenig Material in einer Kapsel enthalten, werden mehrere Kapseln pro Restauration benötigt. So befindet sich die erste Menge bereits in der Aushärtezeit während die folgende Kapsel noch gemischt wird. Mit einer ausreichenden Menge pro Kapsel kann eine Befestigung schneller und sicherer durchgeführt werden.

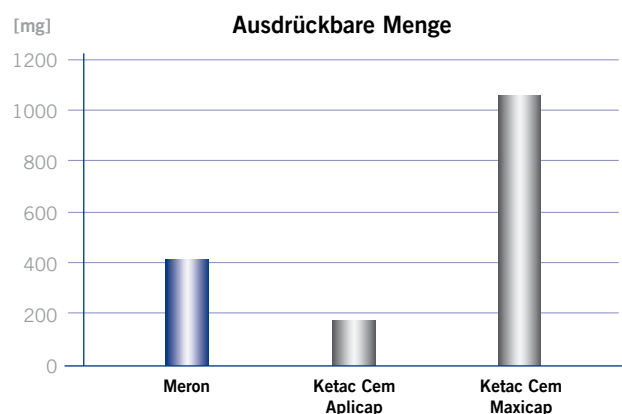

Meron

RÖNTGENOPAKER GLASIONOMER BEFESTIGUNGSZEMENT

Indikationen

Befestigung von

- metallbasierten Kronen, Brücken, Inlays und Onlays
- hochfesten vollkeramischen Kronen und Brücken
- metallbasierten und hochfesten vollkeramischen Kronen und Brücken auf Implantatabutments
- Metall-Wurzelstiften bzw. indirekten Metall-Stift-Stumpfaufbauten
- konfektionierten Stahlkronen
- orthodontischen Bändern

Vorteile

- Hohe ausdrückbare Menge pro Kapsel
 - auch für große Restaurationen
- Sehr gutes Anfließverhalten
- Standfest
- Geringe Filmdicke
- Hohe Transluzenz für ein ästhetisches Ergebnis
- Einfache Überschussentfernung
- Kontinuierliche Fluoridabgabe
- Keine postoperativen Sensitivitäten bekannt



Handelsformen

- | | |
|----------|---|
| REF 1242 | Applikationskapseln 50 Stk. |
| REF 1086 | Set Pulver / Flüssigkeit (35 g / 15 ml) |
| REF 1090 | Set mini Pulver / Flüssigkeit (15 g / 7 ml) |
| REF 2331 | Applicator – AC Typ 1 |

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.de

VOCO-Kundenservice
Tel.: +49 (0) 4721-719-1111
Fax: +49 (0) 4721-719-109
service@voco.de

Zu beziehen durch: